



EasyDrainer®

Flushable Drainage Sleeve

 Brugsanvisning

 Bruksanvisning

 Instructions for use

www.EasyDrainer.com






Tag **EasyDrainer** op af posen.

Öppna påsen med **EasyDrainer** och ta ut innehållet.


Take an **EasyDrainer** out of the bag.

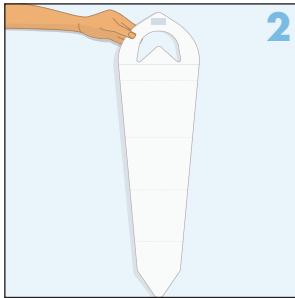

Fold **EasyDrainer** ud til fuld længde.

Veckla ut **EasyDrainer** till sin fulla längd.

Unfold **EasyDrainer** to its full length.

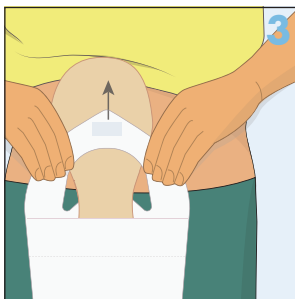

Stomiposens åbning føres igennem **EasyDrainers** åbning og ned i røret. Tapebeskyttelsen tages af og klæbes mod huden, hvis nødvendigt.

Stomipåsens nedre del förs genom **EasyDrainers** öppning och ned i röret. Tag därefter bort tejpplattan och klistra fast EasyDrainer direkt mot huden, om nödvändiga.


Insert the ostomy bag into EasyDrainer. Fix **EasyDrainer** with tape if necessary.



Placer **EasyDrainers** nedre del ned i toiletten.

För sedan **EasyDrainer** nedre del i toaletten.

Place the lower part of **EasyDrainer** in the toilet bowl.

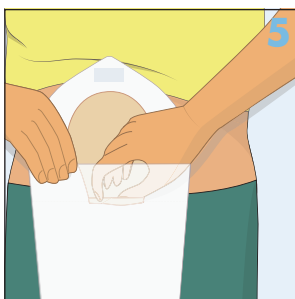

Stomiposen åbnes så indholdet tømmes gennem **EasyDrainer**. Stomiposen aftørres og lukkes.

Stomipåsen kan därefter öppnas så att innehållet kan tömmas genom **EasyDrainer**. Torka och stäng igen stomipåsen.

Open the drain and empty the content of the ostomy bag into **EasyDrainer**. Clean the end of the drain and roll it into the closed position.



Skyl **EasyDrainer** ud i toiletet.

Lossa därefter **EasyDrainer** av och spolas ner i toaletten.

Take **EasyDrainer** off, drop it into the toilet and flush.

Ved vandsparende toiletter anvendes stort skyl.

Använd stor spolning om det är en snålspolande toalett.

When using watersaving toilets, use full flush.

Der bør trækkes ud 2-3 gange svarende til ca. 10-15 l vand.

Spola flera gånger tills den spolade vattenmängden är ungefär 10-15 liter vatten.

Repeat until the amount of water is 10-15 litres.

