

Trio Pearls® er tilgjengelig på Blåresept hos bandagister og apotek over hele landet.

Vi håper du blir fornøyd med Trio Pearls. Dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller en gratis prøve, ta kontakt med vårt kundesenter.

Trio Pearls®

Varekode	Helfo varenummer	Pakningsstørrelse
TR205	801636	100 porsjonsposer

**ubri
medical**



ubrimedical.no



921 17 267



post@ubrimedical.no



Trio Healthcare Ltd. Registered in England. No: 05776276. Registered office: Units 2A-2B, Sandylands Business Centre, Carleton New Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2AA, UK.

M.0153/n0



**Trio Pearls® Gel og
Luktkontrollposer**
**say hello to
confidence**

trio Pearls®



er du bekymret for lukt,
lekkasje eller at det «skvulper»
i stomiposen?

**Trio Pearls® er en
superabsorberende geldannende
luktkontrollspose.**



Forebygger lekkasje

gir flytende stomiinnhold en tykkere konsistens



Kontrollerer lukt

Adsorberer aktivt luktmolekyler



Uten farge

Misfarger ikke klær eller toalett

Mindre stress og søl
med Trio Pearls®



Trio Pearls® NanoActive Teknologi


Trio Pearls® kombinerer superabsorberende geldannende krystaller og nanokonstruerte ingredienser som aktivt adsorberer organiske lukt molekyler. Gir deg mer sikkerhet når det er vanskelig å tømme eller bytte stomiposen.

Trygghet i alle situasjoner

- Bruk den om natten for en god natts søvn
- Ta den med på ferier og lange reiser
- Bruk den daglig for mer kontroll over hverdag og stomi
- Ha Pearls lett tilgjengelig for «peace of mind» ved sosiale begivenheter


slik bruker du Trio Pearls®

1. Du legger helt enkelt en Trio Pearls® oppi stomiposen. Du trenger ikke å åpne selve porsjonsposen. Hele porsjonsposen skal legges i.

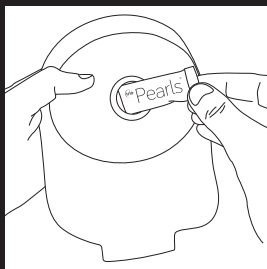

2. Bruker du lukket system tømmer du posen som vanlig og legger en ny porsjonspose i den nye stomiposen.

3. Etter at du har tømt posen, kan du fortsette å tilføre Trio Pearls® ved å sette inn en ny porsjonspose via tømme åpningen.

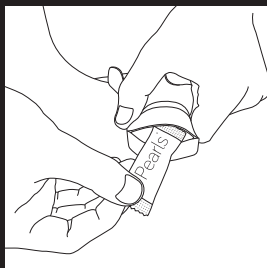

Kun til bruk ved ileostomi eller flytende stomiinnhold.